

arm strong windmill

アームストロング ウィンドミル
[ABL-1700]

受注生産品

●仕様


外 形 寸 法	865～1135 (L) × 740 (W) × 1060 (H) mm 車いすドッキング時1600 (W) mm
質 量	約145kg
電 源	単相100V 15A
消 費 電 力	300W (50/60Hz)
電 源 入 力	0.53kVA (50/60Hz)
昇 降 方 式	アーム回転式
アーム回転スピード	IN・OUT 各約25秒 (最大ストローク時)
最大積載量	100kg
材 質	FRP・ステンレススチール・アルミニウム (アーム)
機 能 性 能	リモコンスイッチ (有線式) ・スロースタートスローストップ機構 ドッキング確認センサー





※写真は R 型タイプ

■標準設置例

- ① ABL-1700 (L) アームストロング ウィンドミル
- ② ABL-1700SC シャワーチェア

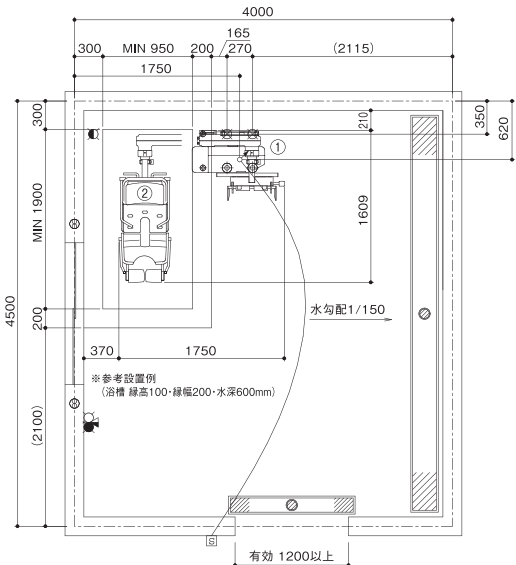

工事区分	設備工事内容・注意事項
設備工事	浴槽に関わる給湯給水、排水設備は別途打ち合わせの上、用意して下さい。 (1)水道法の水質基準に適合する水質であること。
電気工事	① 電源 単相100V 50/60Hz 15A (アース付) ※分電盤から本機への配線は単独として下さい。 電源入力：0.53kVA (50/60Hz) 電 線 単線1.6mm又はより線2.0mm ² ×3芯 (参考値) ※内線規定、及び、敷設状況により適切に選定して下さい。 電線管：PF管呼び16 床面立上げ高さ1000mm以上とし、電線は管端より1000mm出して下さい。 分電盤：漏電遮断器 (定格電流15A、感度電流30mA) を設けること。 アース：D種接地工事 ② 手元開閉器 (ブレーカー)：単相100V 15A (浴室外に設置して下さい) ※製品に異常があった際、すぐに電源を開放できる位置に手元開閉器 (ブレーカー) を設置して下さい。
アンカー工事 (後打ち)	③ アンカーボルト 2-M16 アンカーボルト ケミカルアンカー：130mm打ち込み ※防水層・床暖層等に支障がない様にして下さい。 アンカー部のコンクリート強度：15N/mm ² (150kgf/cm ²) 以上のこと。
その他 注意事項	(1)浴室内の換気には十分注意して下さい。 ※換気が不十分の場合は、製品内部に結露が発生し、故障につながる恐れがあります。 (2)本機周辺の水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとして下さい。 (3)浴室までの搬入経路は、有効開口寸法1200mm以上、通路側有効1800mm以上となるようにして下さい。

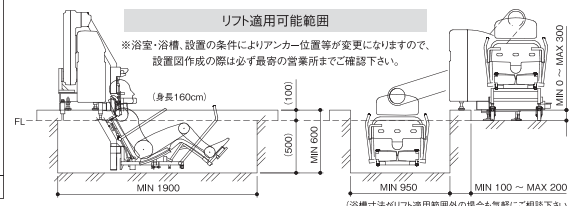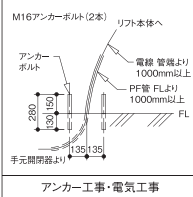

●図面データをご用意できます。●浴室状況に応じてL型・R型のどちらでも選択可能です。●据付には各種設置条件があるため設計、選定段階より弊社担当までご相談ください。

ウィンドミル 専用シャワーチェア

[ABL-1700SC]

●仕様

外 形 寸 法	通常 960 (L) × 610 (W) / 座面幅500 (W) × 1080 (H) チルト時 1160 (L) × 610 (W) × 980 (H) mm
シ ー ト 高	臀部390mm (前縁部455mm)
質 量	約37kg
材 質	ABS・ステンレススチール・ポリエチレンフォーム
チ ル ト 角	10°・30°手動チルト機構
機 能 性 能	キャスター径φ100mm、ハネ上げ手すり、介助者手すり、 長さ及び高さ調整式枕、U字シート、旋回ハネ上げフットレスト、 安全ベルト、ベルトパッド



○ 納入事例

定期点検のご案内

安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アマノ

本 社 〒438-0805 静岡県豊田市池田1381-11
TEL.0538 (37) 2811 FAX.0538 (37) 8516

ホームページ <http://www.amano-grp.co.jp/>

アマノ 入浴

検 索

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(259)5611
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 東京東営業所 TEL.04(7126)7702
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 名古屋営業所 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(433)0931

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございまずと感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RKS.2104.1000

AMANO®



arm strong
windmill

アーム型バスリフト
アームストロング ウィンドミル [ABL-1700]

独自のアーム円弧動作により、スムーズで快適な乗り心地。
チルトリクライニングにより、安定した入浴姿勢を実現。



入浴・出浴
(洗い場～浴槽) (浴槽～洗い場)
ともに
Slow Start
& Slow Stop!!



① 専用シャワーチェアの背中を本体に押しつけると簡単に連結できます。また、解除ペダルを踏むと本体とシャワーチェアを簡単に分離することができます。



② リモコンスイッチの[入浴]を押すと、スロースタート制御によりゆっくり動き始めます。



③ 半円を描くように座部が浴槽内に移動します。



④ スローストップ制御により、ゆっくりと停止します。



⑤ 入浴完了です。

≫シャワーチェア (ABL-1700SC) の特長

チルトリクライニング機構により、座面にかかる体圧を背部と座部で分散させて受けるので、身体の方前へのズレを防ぎ、重心が後ろに移ることで安定した入浴姿勢を保てます。




腰痛 予防 “脚上げ連動”チルトリクライニング機構の採用。

背部のリクライニング操作に連動して脚部が持ち上がるため介護作業の労力負担を軽減します。



●スライド調整式枕
スポンジマットの枕の位置は調整可能なので、頭の高さに合わせて位置を前後上下にスライドし調整することができます。

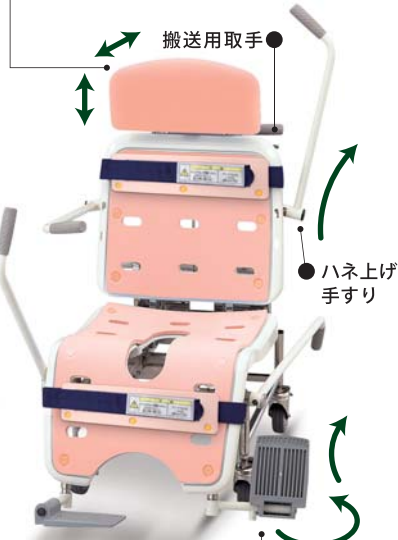

●旋回ハネ上げフットレスト
フットレストが収納でき、入浴者が移乗する際に邪魔になりません。

リモコンスイッチ採用。
便利な手元操作で昇降が簡単。

リモコンスイッチの入浴ボタンを押すだけでリフトアームが作動します。スイッチから指を離すとすぐに止まる安全設計です。



未使用時の浴槽は広々と安全・清潔に利用できます。

浴槽内には余分な支柱や台座などありません。リフトを使わず一般浴として使用する際には、浴槽内をすみずみまで安心して利用できます。



Slow Start
&
Slow Stop

インバータ制御で、動きがさらに快適なスロースタート＆スローストップ。
アームの動きをごくゆっくりな速度から普通速度へと自然に変え、自然で快適なスロースタート＆スローストップを実現しました。