



セルフサポートバス

blancbath

ブランバス
A12A

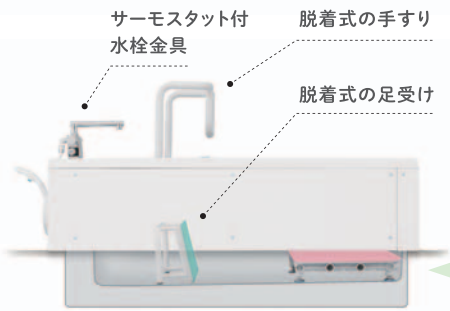

外形寸法	1523(L)×756(W)×714(H)mm (浴槽フチ高さ400mm)
浴槽内寸法	1350(L)×637(W)×530(D)mm
浴槽湯量	約420L(オーバーフローまで)
実使用湯量	約370L
質量	約63kg
材質	ステンレススチール・FRP・スチール(メッキ)
給湯速度	毎分15～20L ※吐出量は条件により異なります。
固定方法	堀込据置型
機能性能	シャワー・カラン1基(湯はり・シャワー兼用)
付属品	手すり・足受け

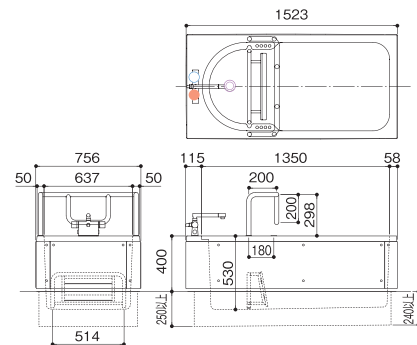

● おすすめオプション

浴槽内すのこ

すのこを使用すればより
立ち上がりやすくなります。
小柄な方の入浴にも最適です。



■ すのこ不使用




■ すのこ使用



リフト付シャワーキャリア

全長	920mm
全高	1090～1375mm
全幅	530mm
座面高最高	515～585mm
座面高最低	325mm
座面幅	420mm
座面奥行き	395mm
重量	52.5kg
耐荷重	80kg


キャリア
LS-310

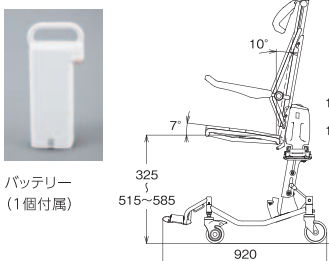

※胸のベルトはオプションとなります

全長	975mm
全高	1165～1445mm
全幅	535mm
座面高最高	520～590mm
座面高最低	335mm
座面幅	420mm
座面奥行き	375mm(またぎサポート部含まず)
重量	62kg
耐荷重	100kg

キャリア
LS-500

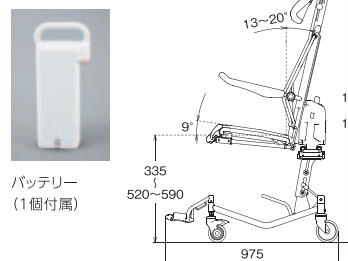

※胸のベルトはオプションとなります

収納式レール LTC-100A

全長 400mm

全幅 810mm

重量 約31.5kg

定期点検のご案内

安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■ 取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アmano

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <https://www.amano-grp.co.jp/>

アmano 入浴

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(355)2706
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 東関東支店 TEL.04(7157)4733
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 三島出張所 TEL.055(957)2464
- 名古屋支店 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(558)2615

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございしますと感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RKT.2607.3000



セルフサポートバス
ブランバス blancbath A12A

個浴
リフト
セット

リフト付シャワー
キャリア LS-310



AMANO®

リフト付シャワーキャリーと セルフサポートバスが 快適な入浴をお手伝い。

入浴手順

STEP 1



STEP 4



STEP 7



STEP 2



STEP 3



STEP 6



STEP 5



昇降機能が便利！リフト付シャワーキャリー

着脱式
ヘッドサポート
(上下調整が可能)

昇降スイッチ
(左右両側に装備)

……バッテリー

着脱式
フットサポート

昇降幅28.5cm

こんな
時に便利

1 足を洗う時

腰に負担のかからない
高さで、足を洗うことが
できます。

この高さなら
腰が痛くないわ

こんな
時に便利

2 立つ時

人によって立ちやすい高さは違います。
一般的に40cm前後ですが、筋力のお
ちた方がご自分で移乗しやすい高さに
調整することができます。

低い位置
から立つ

高い位置
から立つ

※写真はLS-300です。

お悩み解決！セルフサポートバス

こんなことで
困ることって
ありませんか？

お悩み
あるある

1

リフトを導入
したら思った
よりも足元が
せまかった。

コレで
解決！

脚を曲げる
のがつらい。

お悩み
あるある

2

自力で入浴
できるのに、
必要な場所に
手すりがない。

コレで
解決！


どこを
持てば
いいの？

浴槽内寸135cmの広々浴槽。

リフト使用時でも有効内寸が104cmあり、ゆったりと快適な
入浴感を得られます。

リフト
入浴


(入浴者モデル
身長約163cm)

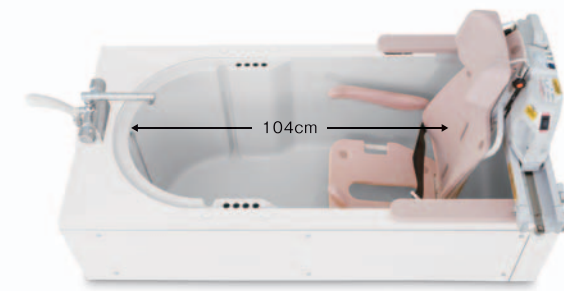

小柄な方の入浴もサポート。

自立
入浴

(入浴者モデル
身長約163cm)

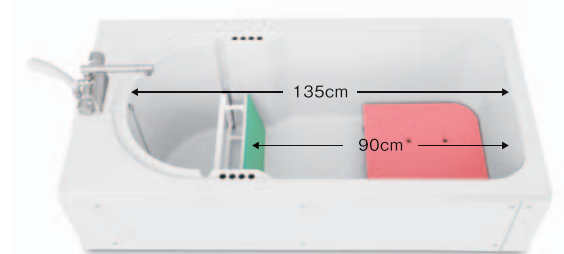

標準装備の
脱着式足受け

安定した入浴姿勢を
支えます。

※浴槽内寸はオプション品です。

簡単に脱着できる手すりを 標準装備した浴槽。

大型手すりを持ってまたげます。フチ高も
約40cmとまたぎやすい高さです。




足下には滑り
止めを配置。

浴槽底面に滑り止
めを配置すること
で、入浴時の滑
りを防止します。



手すりは前後に位置を
変更できます。

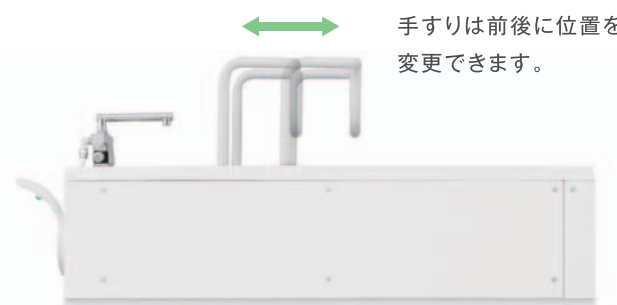

2段手すりは浴槽から出る際に縦横の
複合手すりとして力を入れやすいです。



セルフ
サポートバスで
まとめて解決♪

