


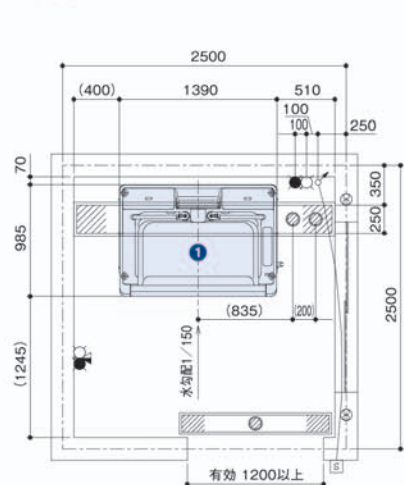



● 浴槽本体仕様		
	新湯タイプ (A77R)	ろ過タイプ (A77RS)
外形寸法	1390 (L) × 985 (W) × 1042 (H) mm	
浴槽内寸法	1070 (L) × 560 (W) × 520 (D) mm	
浴槽湯量	約270L (オーバーフローまで) (実使用湯量約210L)	
質量	約220kg	約200kg
電源	単相100V 15A	
消費電力	300W (50Hz) / 410W (60Hz)	490W (50Hz) / 720W (60Hz)
電源入力	0.40kVA (50Hz) / 0.41kVA (60Hz)	0.66kVA (50Hz) / 0.73kVA (60Hz)
材質	浴槽・外装: FRP, ABS樹脂, PE フレーム: スチール+防錆塗装 主要部品: ステンレススチール、スチール+亜鉛メッキ	浴槽・外装: FRP, ABS樹脂 フレーム: スチール+防錆塗装 主要部品: ステンレススチール、スチール+亜鉛メッキ
給湯・給水	20A 各1本 (1次側設備)	
座面高さ	約430mm (開口部分) ※床から浴槽底面まで	
有効水深	約480mm	
湯はり時間	〔実使用湯量〕約100秒 (50Hz) / 約90秒 (60Hz)	〔実使用湯量〕約90秒 (50Hz) / 約80秒 (60Hz)
排水タンク送湯時間	〔実使用湯量〕約90秒 (標準配管時)	〔実使用湯量〕約100秒 (50Hz) / 約100秒 (60Hz)
排水方式	プッシュボタン式 (排水栓 2箇所)	プッシュボタン式 (排水栓 1箇所)
タンク	内蔵 (約172L)	別置き
タンク給湯時間	約8分 (設備条件により、給湯時間は異なります。)	約11分 (設備条件により、給湯時間は異なります。)

新湯タイプ (A77R) 機能・性能	ろ過タイプ (A77RS) 機能・性能
温度管理システム、電動昇降機機能、電動昇降機ロック機能、扉上昇時過負荷検知機構、収納式ハネ上げ手すり、停電時下降スイッチ、適正水位自動停止機能、デジタル温度表示 (貯湯・タンク・おふろ・たし湯・シャワー)、入浴時間表示、音声アナウンス、ハンドシャワー1基、漏電ブレーカー内蔵、オーバーフロー (固定式)、失禁時漏入警報機能、配管設置機能、配管洗浄機能、メンテナンス表示 (漏れ替え、設置、洗浄、配管点検、薬液交換)、タンク手動排水バルブ	温度管理システム、電動昇降機機能、電動昇降機ロック機能、扉上昇時過負荷検知機構、収納式ハネ上げ手すり、停電時下降スイッチ、適正水位自動停止機能、デジタル温度表示 (貯湯・タンク・おふろ・たし湯・シャワー)、入浴時間表示、音声アナウンス、ハンドシャワー1基、漏電ブレーカー内蔵、オーバーフロー (固定式)、失禁時漏入警報機能、配管設置機能、配管洗浄機能、メンテナンス表示 (漏れ替え、設置、洗浄、配管点検、薬液交換)、タンク手動排水バルブ、薬液濃度調整機能



① A77R アビット (新湯タイプ)



① A77RS アビット (ろ過タイプ) ② 貯湯タンク

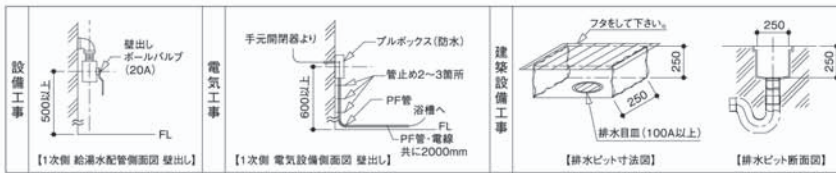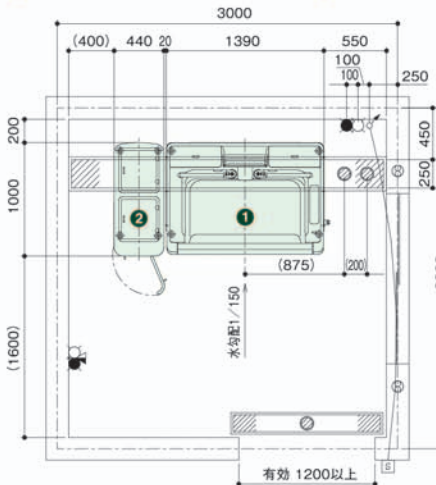


平面図

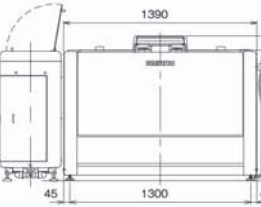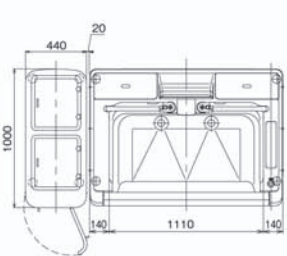

側面図

● A77RS-T 貯湯タンク仕様

外形寸法	1000 (L) × 440 (W) × 935 (H) mm
質量	約50kg
材質	PE (ポリエチレン) フレーム: ステンレススチール
貯湯量	約215L
ろ過装置	内蔵 フィルター式全量ろ過
フィルター	ディスクフィルター 100μm (2段階) (取り外し清掃可能)
殺菌装置	内蔵 次亜塩素酸ナトリウム注入式
排水方式	バルブ排水

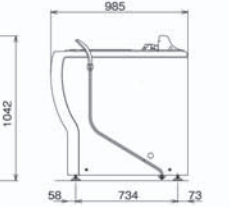

前面図

● 標準設置例

工事区分	設備工事内容・注意事項
設備工事	● 給湯 20A ボールバルブ止め (壁出しFL+500mm以上としてください。 ○ 給水 20A ボールバルブ止め (壁出しFL+500mm以上としてください。 (1) 水道法の水質基準に適合する水質であること。 (2) 給湯、給水圧は0.2~0.3MPa以内 (2.0~3.0kg/cm ² 以内) とし、同圧になるようにすること。 (3) 給湯、給水流量は、20~30L/minのこと。 (4) 給湯温度は、60℃ (末端温度) にすること。 (5) 給湯設備は、本機専用のガス給湯器50号相当 (ボイラー能力75000kcal/h) 以上を設置すること。 ※ガス給湯器が指定号数以下の場合、給水温によっては、給湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。
電気工事	○ 電源 単相100V 50/60Hz 15A (アース付) ※分電盤から本機への配線は単独としてください。 電源入力: 【新湯タイプ】 0.40kVA (50Hz) / 0.41kVA (60Hz) 【ろ過タイプ】 0.66kVA (50Hz) / 0.73kVA (60Hz) 電線: 単線1.6mm又はより線2.0mm ² ×3芯 (参考値) ※内線規定、及び、敷設状況により適切に選定してください。 電線管: PF管呼び16 壁出しFL+600mm以上とし、PF管・電線共に壁面より2000mm出すこと。 分電盤: 漏電遮断器 (定格電流15A、感度電流30mA) を設けること。 アース: D種接地工事 Ⓜ 手元開閉器 (ブレーカー): 単相100V 15A (浴室外に設置してください) ※製品に異常があった際、すぐに電源を開放できる位置に手元開閉器 (ブレーカー) を設置してください。
建築設備工事	● ビット排水 100A トラップ付 ※目皿が掃除できる位置に設置してください。 配管口径、排水能力が不足する場合は、複数個設けること。 排水能力: 200L/min以上のこと。
その他注意事項	(1) 浴室内の換気には十分注意してください。 ※換気が不十分の場合は、製品内部に結露が発生し、故障につながる恐れがあります。 (2) 本機周辺の水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとしてください。 (3) ビット深さは水上で250mm以上とってください。 (4) 浴室までの搬入経路は、有効開口寸法1200mm以上、通路側有効1800mm以上となるようにしてください。

定期点検のご案内

安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■ 取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アmano

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538 (37) 2811 FAX.0538 (37) 8516

ホームページ <https://www.amano-grp.co.jp/>

アmano 入浴 検索

- 札幌営業所 TEL.011 (768) 8758
- 盛岡営業所 TEL.019 (601) 1566
- 仙台営業所 TEL.022 (355) 2706
- 新潟営業所 TEL.025 (384) 0987
- 関東支店 TEL.048 (423) 6856
- 東関東支店 TEL.04 (7157) 4733
- 南関東支店 TEL.045 (947) 3930
- 本社営業所 TEL.0538 (37) 6416
- 三島出張所 TEL.055 (957) 2464
- 名古屋支店 TEL.052 (505) 6500
- 松本営業所 TEL.0263 (88) 2797
- 金沢営業所 TEL.076 (269) 4011
- 大阪支店 TEL.06 (6380) 5177
- 神戸営業所 TEL.078 (939) 4772
- 広島営業所 TEL.082 (555) 8839
- 高松営業所 TEL.087 (813) 3600
- 福岡営業所 TEL.092 (558) 2615

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ● 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございしますと感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

abitt® RKC.2607.5000



AMANO®

“収納式スウィング扉”の採用により、
介助のしやすい浴槽形状を実現しました。



STEP 1

座る

ソファに腰をかける
感覚で座ります。

自立歩行ができる方は、ソファに座る感覚で！

✓ 移乗しやすいソファ形状。

● 収納式スウィング扉

“収納式スウィング扉”の採用により足元スペースが確保され、移乗しやすくなっています。

● 座面高さは約43cm

座面が低いため、立ち座り時の足つきがよく、介助者も無理のない姿勢でケアできます。



STEP 2

旋回

90度旋回して
入浴姿勢をとります。



STEP 3

入浴

「上昇」スイッチを押してスウィング扉を閉め、
「入浴」スイッチを押せば入浴完了です。



(入浴モデル: 身長約160cm)

ポイント

シャワーチェアからの移乗もラクラク！



“持ち上げない” 移乗をご提案

“持ち上げる”ことは腰痛のリスクを高め、介助者自身の健康も害することになります。介護現場において腰への負担となる作業を、1つでも減らしたいとアマノは願います。

推奨品
「スライディングシート」



スライディングシート「ラクラックス ミニ・座」を利用することで、よりスムーズに座位移乗がおこなえます。

詳しくはP6をご覧ください。

ポイント

座ったその場で洗身できる！



小柄な方でも一度で入浴ポジションに座れます。座ったその場で洗身し体の向きを変えるだけで入浴が可能です。(浴槽の中心までは27cm)



付属品
「ターンテーブル」



ターンテーブルを利用すれば、入浴姿勢への旋回がさらにしやすくなります。詳しくはP6をご覧ください。

ポイント

収納式ハネ上げ手すりを標準装備！



● 収納式
ハネ上げ手すり
入浴者の身体レベルに合わせて、移乗時のバランス保持や入浴中の姿勢をサポートします。



● 旋回時の姿勢保持



● 入浴中の姿勢保持




● 身長約150cmの方の入浴イメージ



● 身長約180cmの方の入浴イメージ



コンパクトながら、ゆったり快適な入浴感。

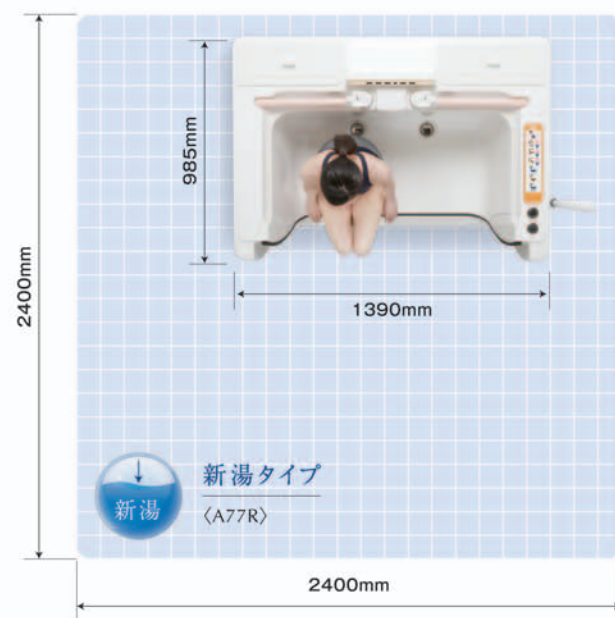

☑ ユニットバスにも導入可能。



安心・安全の機能も充実。

☑ 安心の全温度管理システムを搭載。

- タンク内温度
タンク内の温度が36～44℃でない場合には、入浴スイッチを押しても、浴槽へ送湯されません。
- たし湯温度
50℃以上のお湯が出ると、たし湯が自動停止します。
- 浴槽内温度 **A77RSのみ**
ろ過タイプをご使用の場合、45℃以上になると浴槽内の湯は自動でタンクへ送湯されます。
- シャワー温度
45℃以上のお湯が出ると、シャワーが自動停止します。



☑ 安全に配慮した機能と装備。

- 停電時下降スイッチ
入浴中に予期せぬ停電が発生してもスイッチ1つで扉を下降させることができます。
- 扉上昇時過負荷検知機構
扉上昇時には、扉上部に過負荷がかかった場合、自動で上昇を停止する安全機能が搭載されています。



- 非保持スイッチ
扉の昇降時には操作スイッチから指を離せば瞬時に停止するようになっています。

- 温度確認
フタを開けて直接手で湯温の確認ができます。




☑ 見やすい温度表示パネルで操作も簡単。

- 温度表示パネル
視認性のよい温度表示パネルを浴槽中央に配置し、5ヶ所の湯温を表示。湯温を確認しやすく安全です。入浴時間表示も標準装備。



〈A77R〉

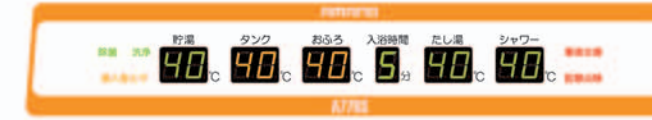

〈A77RS〉

※カタログ説明のため全ての表示をしています。

- 操作パネル

わかりやすいアイコンデザインを採用。見やすい表示と簡単操作で、はじめての介助者でも安心です。



主な操作手順は上から順におこなえます。



choice


ニーズにあわせて選べる「新湯タイプ」と「ろ過タイプ」。

新湯タイプ (A77R)

毎回新しいお湯で入浴可能。
小規模施設に最適な「新湯タイプ」

STEP 1 >> 準備

貯湯スイッチを押してあらかじめタンクに貯湯します。

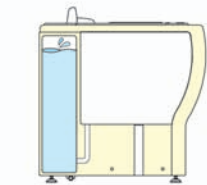

STEP 2 >> 入浴

入浴スイッチを押すと浴槽に湯はり。同時にタンクへ次の入浴者の湯を貯湯します。



STEP 3 >> 排水

排水スイッチを押すと全ての湯を排水します。




※カタログ記載のイラストは本製品の機能をわかりやすく図解したイメージとなります。

ろ過タイプ (A77RS)

入浴後のお湯を殺菌・ろ過して再利用。
大規模施設に最適な「ろ過タイプ」。


STEP 1 >> 準備

貯湯スイッチを押してあらかじめタンクに貯湯します。

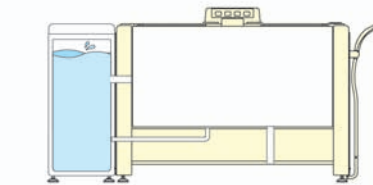


STEP 2 >> 入浴

入浴スイッチを押すとタンクから浴槽へ湯はります。

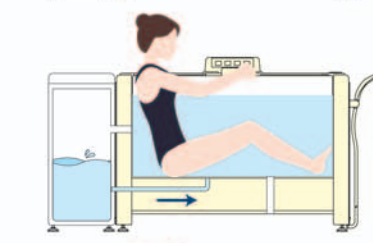

STEP 3 >> 出浴

出浴スイッチを押すとタンクへ殺菌・ろ過しながら送湯します。

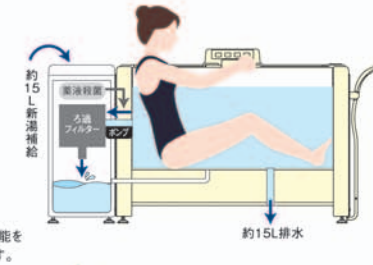


※カタログ記載のイラストは本製品の機能をわかりやすく図解したイメージとなります。

>> Ecology

節水・節約

●地球にも財布にもやさしさ

お湯をリサイクルして節水率約75%を実現しました。

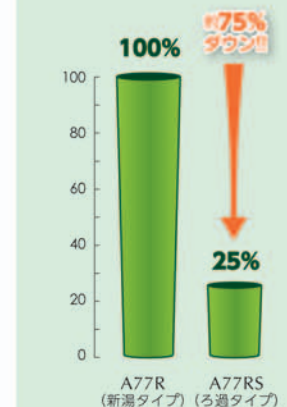

※1日に5人入浴した場合の従来品(新湯タイプ)との比較

>> Filter/Sterilize

ろ過殺菌

●いつでもきれいなお湯で入浴を

フィルター式全量ワンウェイろ過なので、浴槽からタンクに戻るお湯は、全て殺菌・ろ過されます。タンクには汚れたお湯が戻らずに、いつでも清潔なお湯で入浴して頂けます。

●“使える”メンテナンス機能も充実

湯入替え…スイッチ1つで浴槽内の湯を排水すると同時にタンクに新湯を貯めます。薬液注入…薬液ボトル交換時のエア抜きや手動による薬液の注入がおこなえます。除菌/洗浄…自動プログラムにより、配管内の除菌と洗浄がおこなえます。薬液濃度調整機能…薬液をお好みの濃度に調整することができます。




フィルター式
全量ワンウェイろ過



アミノ独自のディスクフィルター
※実際のフィルターは黒色です

ろ過の前に薬液注入するため、ろ過フィルターが雑菌の“温床”になることを抑えます。

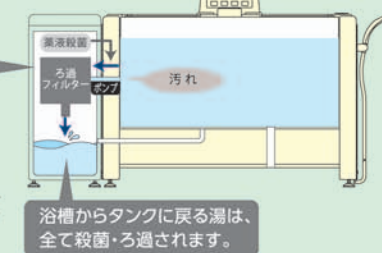

浴槽からタンクに戻る湯は、全て殺菌・ろ過されます。

>> Clean 配管洗浄

●見えない汚れも落とします

浴槽とタンクの間の配管を自動で洗浄するプログラムを搭載。専用の洗浄剤で、手の届かない配管内の雑菌増殖を抑えます。



●配管洗浄剤
ファインビュー

付属品

ターンテーブル TT-W

外形寸法 直径365mm、厚さ25mm
材質 ポリウレタン、ABS樹脂、ステンレス



オプション

ベルト付背部マット A77A-M

外形寸法 350(H)×330(W)mm ※使用時
材質 ポリエチレンフォーム
付属品 ベルト、ベルトパッド、吸盤

ご注意!

入浴姿勢の固定目的では使用できません。

背中“痛み”や“冷たさ”を和らげます。



推奨品

すべり止めマット オーバルリンク
マットタイプ M / マットタイプ L

外形寸法 M:幅38cm×長さ55cm×厚さ0.20cm
L:幅38cm×長さ70cm×厚さ0.20cm
色調 ライトグリーン、グリーン、ピンク、レッド、ブラウン、ブルー
材質 天然ゴム / SBR

浴槽・浴室用すべり止め、その他一般用としてお使いください。




推奨品

たちあつぷⅡ 浴室用
CKA-Y23 / CKA-Y24

外形寸法 600(L)×600(W)×700・750・800・850(H)mm(高さ4段階調整)
質量 CKA-Y23:約21.9kg CKA-Y24:約19.7kg
材質 手すりパイプ:プラスチック被覆ステンレスパイプ
手すりジョイント:プラスチック
ベース:ステンレス マット:PVC・マグネット

ご注意!

入浴者の立ち上がる際には必ずベースプレート上でおこなってください。トランスファー手すりはアビット収納式扉の軌道上には設置しないでください。

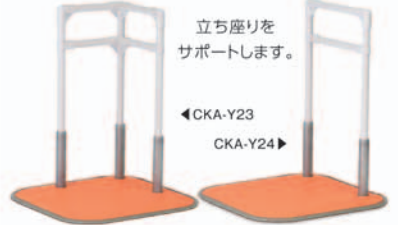

推奨品

可動式入浴台
アクアムーブ PN-L14001D

外形寸法 座面:46(W)×46(D)×35~45(H)cm(ブレイキ時)
ひじ掛:7.5(W)×46(D)×21(H)cm
全体:62(W)×72(D)×75~85(H)cm
質量 16kg
材質 ひじ掛・座面・背もたれクッション:EVAクッション
背もたれシート:ナイロン製(2枚付属)
座面:ポリエチレン、フレーム:アルミニウム
フットレスト:ポリプロピレン、脚ゴム:合成ゴム



推奨品

スライディングシート
ラクラックス ミニ・座 M64RK12
ラクラックス ボータブル M64RK13

外形寸法 M64RK12:33×42cm M64RK13:33×31cm
総重量 M64RK12:460g M64RK13:290g



推奨品

シャワーキャリア (フラット座面仕様) CAK-310F
シャワーキャリア (U字型座面仕様) CAK-310

外形寸法 480(W)×840(D)×810~890(H)mm
座面高 380~460mm
キャスター径 φ100/φ300
質量 フラット座面仕様約12.0kg/U字型座面仕様約11.2kg
材質 アルミ、ステンレス、ウレタンフォーム



※写真はCAK-310です。