





フリーアプローチャワードーム beluga

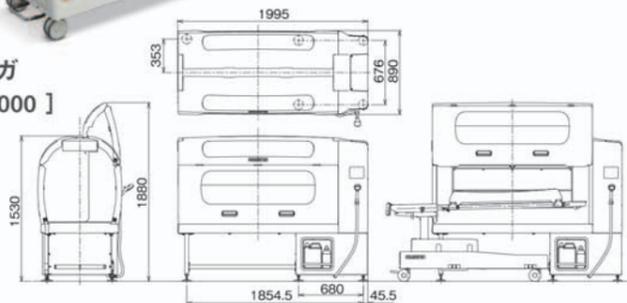

ペルーガ [MC3000]



電動昇降 ストレッチャー [MC30-ST]

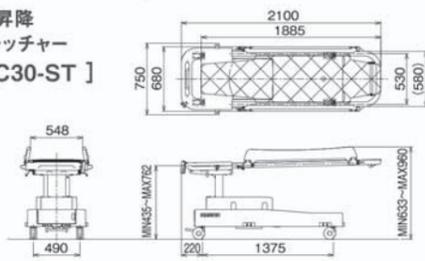


外形寸法	1995(L)×890(W)×1530(H)mm ※開口時 1880(H)mm
本体寸法	1600(L)×760(W)×815(H)mm
質量	約160kg
電源	単相100V/15A (一次側設備)
消費電力	230W(50Hz/60Hz)
電源入力	0.35kVA(50Hz)/0.34kVA(60Hz)
材質	本体：PP・PVC、 フレーム：ステンレス、 カーテン：ポリエステル(裏地ポリウレタン)
シャワーノズル	ノズル数：上10基、下5基 平均粒径：380μm 約16.3L/min(多い) 約15L/min(普通) 約12.5L/min(少ない)

石けん液注入量	約20ml/min
3off注入量	約110ml/回
機能・性能	温度管理システム(本体シャワー・ハンドシャワー)、 デジタル温度表示(本体シャワー・ハンドシャワー)、 ハンドシャワー1基、漏電ブレーカー内蔵、 石けん液注入機能、入浴時間表示、 音声アナウンス、おまかせ入浴機能、 浴槽洗浄機能、情報表示画面、 言語選択機能(日本語/英語/中国語)、 扉開閉補助機構、ウルトラファインバブル内蔵
消耗品	専用石けん液「薬用シャワーローション」(容量4L) 専用薬液「入浴装置用3off」(容量2L)

外形寸法	2100(L)×750(W)×全高633~960(H)mm
担架面高さ	約435~762mm(FL~担架ネット面)
担架面幅	530mm
質量	約95kg
最大積載量	100kg
材質	カバー：PVC、フレーム：ステンレス、サイドフェンス：PP、ネット：ポリエステル
電源	DC24V 2.5Ah(バッテリー仕様)
昇降装置	電動アクチュエーター
昇降時間	上昇：約12秒 / 下降：約10秒(積載量70kg)
昇降回数	バッテリー1回充電あたり約50回(積載量70kg)
充電時間	約3時間(バッテリーの消耗により異なる)
機能・性能	サイドフェンス、トータルロック、キャスター径φ125mm、担架マット、 安全ベルト、ベルトパッド、ネット、落下防止ベルト、保護パッド、リモコン、 非常時上昇レバー、バッテリーバック、充電器、ACアダプター、 上昇端メロディー、バッテリー残量表示、バッテリー残量音声アナウンス

標準設置例

- MC3000 ペルーガ(Lタイプ)
- MC30-ST 電動昇降ストレッチャー

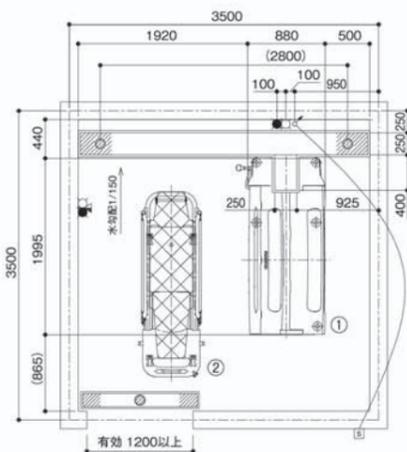

工事区分	設備工事内容・注意事項	設備工事	電気工事
設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 給湯 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) 給水 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) <p>(1) 水道法の水質基準に適合する水質であること。 (2) 給湯、給水圧は0.2~0.3MPa以内(2.0~3.0kg/cm²以内)とし、同圧になるようにすること。 (3) 給湯、給水流量は、20~30L/minのこと。(4) 給湯温度は、60℃(末端温度)にすること。 (5) 給湯設備は、本機専用のガス給湯器50号相当(ボイラー能力7500kcal/h)以上を設置すること。 ※ガス給湯器が指定号数以下の場合、給湯温度によっては、給湯時間シャワー吐出量に支障が生じる場合があります。</p>	<p>【1次側 給湯水配管側面図 壁出し】</p>	<p>【1次側 電気設備側面図 壁出し】</p>
電気工事	<ul style="list-style-type: none"> 電気 単相100V 50/60Hz 15A(アース付) ※分電盤から本機への配線は単独として下さい。 電源入力：0.35kVA(50Hz)/0.34kVA(60Hz) 電線：単線1.6mm²又はより線2.0mm²×3芯(参考値) ※内線規定、及び、敷設状況により適切に選定して下さい。 電線管：PF管呼び16 壁出しFL+600mm以上とし、PF管・電線共に壁面より300mm出すこと。 分電盤：漏電遮断器(定格電流15A、感度電流30mA)を設けること。 アース：D種接地工事 手元開閉器(ブレーカー)：単相100V 15A(浴室外に設置して下さい。) ※製品に異常があった際、すぐに電源を開放できる位置に手元開閉器(ブレーカー)を設置して下さい。 	<p>建築設備工事</p> <p>【排水ピット寸法図】</p> <p>【排水ピット断面図】</p>	
建築設備工事	<ul style="list-style-type: none"> ピット排水 100Aトラップ付 ※目皿が掃除できる位置に設置して下さい。 配管口径、排水能力が不足する場合は、複数個設けること。排水能力：30L/min以上のこと。 		
その他の注意事項	<p>(1) 浴室内の換気には十分注意して下さい。※換気が不十分の場合は、製品内部に結露が発生し、故障につながる恐れがあります。 (2) 本機周辺の水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとして下さい。 (3) ピット深さは水上で200mm以上として下さい。 (4) 浴室までの搬入経路は、有効開口寸法1200mm以上、通路側有効1800mm以上となるようにして下さい。 (5) 浴室外(脱衣室等)にバッテリー充電用のコンセント(単相100V)を用意して下さい。</p>		

定期点検のご案内 安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アmano

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516
ホームページ <https://www.amano-grp.co.jp/>

アmano 入浴

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(355)2706
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 東関東支店 TEL.04(7157)4733
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 三島出張所 TEL.055(957)2464
- 名古屋支店 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大坂支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(558)2615

安全に関するご注意

- 使用前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございすと感電や火災の原因となる場合があります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RKT.2603.4000

フリーアプローチャワードーム
ペルーガ [MC3000]



beluga



AMANO®

使い心地と機能性を両立
ドームタイプのシャワー浴槽



POINT
1


省スペースで、省ストレス。

フリーアプローチ

縦だけでなく、斜め・横方向からもストレッチャーの進入が可能。
最小3000×3000の浴室にも導入可能なコンパクト設計。

ガルウイング

軽い力で上げ下げ可能。
上に折りたたまれるので、
広く浴室を使えます。

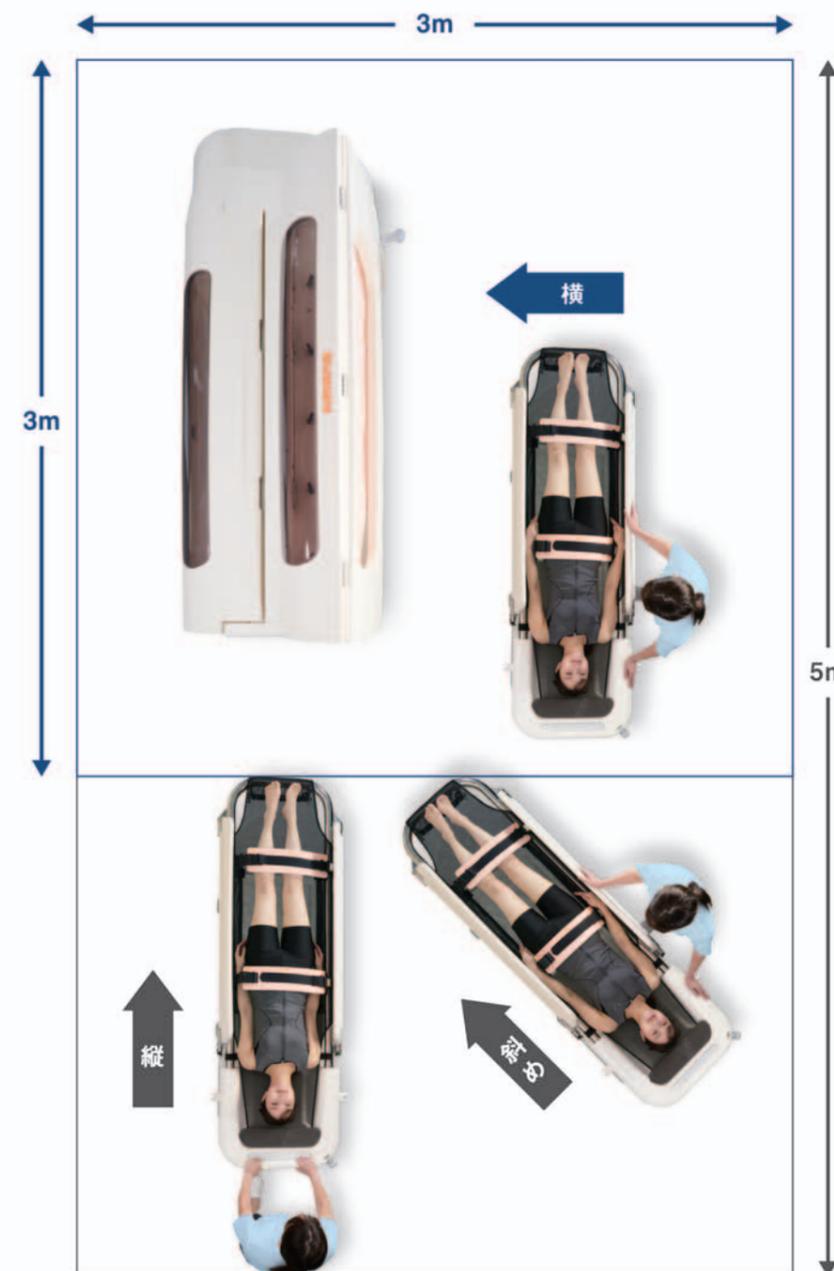

女性でも
軽々!



POINT
2

ワンランク 上のぬくもり。

シャワー浴で気になる「寒さ」。
ペルーガはドーム形状と15基のノズル
そしてカーテンで温かさを保ちます。

背中シャワーで プラスアルファの温かさ

アマノのこだわり、背中シャワー。
しっかり温まってほしいから湯量
たっぷりのノズルを背中側にも搭載。




保温長持ち、ウルトラファインバブル。


ウルトラファインバブル®を搭載。出浴後も高い保温性が続きます。

● 小さな泡の大きな力! 肌に優しい洗浄力!

通常の泡よりもずっと小さい1μm(0.001mm)未満の泡が毛穴の間に入り込み、汚れや臭いの元をかき出し、お肌の健康を保つことができます。
また、ウルトラファインバブルは表面温度保持の効果も見込めます。

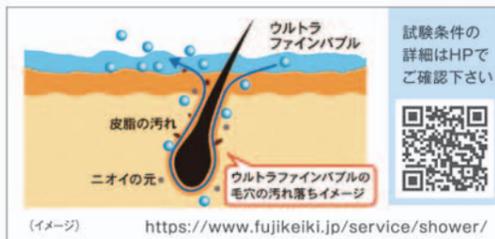

※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

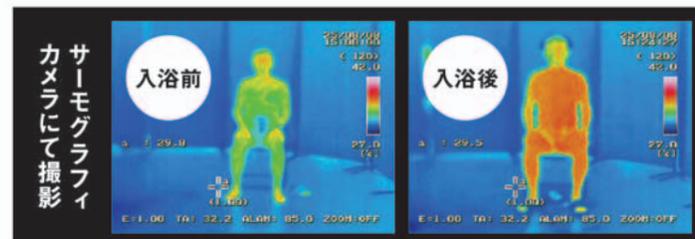

ペルーガに入浴する前、入浴した後の体温を測定

※モデルは男性用水管を装着しております。

POINT
3

やさしさを詰め込んだ設計。

入浴中も見守りたい。でも、開けたら寒くなってしまふ。
ペルーガには観察窓を搭載。
扉を開けなくても、立ったまま中の様子を観察できます。
もちろん、扉を閉めたまま介助窓から手を入れて入浴介助を行うこともできます。



便利な2か所の操作パネル。

2か所の操作パネルで、頭側からも足側からも操作が可能です。




頭側の操作パネルでは、入浴以外にも様々な操作が可能です。



足側の操作パネルでも、温度調整などの操作が可能です。

POINT
4

専用ストレッチャーにもこだわり満載。

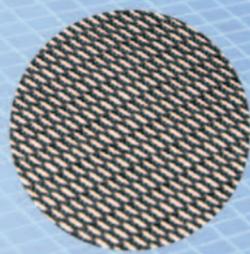

背中シャワーが
しっかり当たる
メッシュ素材。

背中にはメッシュ素材を使用。
背中シャワーがしっかり当たります。
軽くはじくだけで水が落ちる繊維を採用し、
2人目以降の利用者も冷たさを感じづらいです。



専用マット(付属品)



枕(オプション)



「小さな便利」にもこだわります。



● マルチフック

毎日のケアをちょっと快適に。
使いやすさを高めます。

たくさん使うものだから「小さな便利」が実は大事。
そう思うからこそ、ストレッチャーにもこだわりを
詰め込みました。



● シャワーフック

洗身中にシャワーヘッドをかけられる
ため置き場に困りません。



● ニッケル水素バッテリー

低温・高温の環境でも作動。
国内生産で安心です。



● 大型サイドフェンス

本体への進入時にサイドフェンスに
つかまっても、指を挟まない安全設計。

POINT
5

入浴現場の生産性を向上。

自動で体を洗える

入浴後の清掃時間を短縮させる

「おまかせ入浴機能」や「浴槽洗浄機能」を搭載。



※写真はCGイメージです。

「おまかせ入浴機能」で簡単操作。

「入浴」「石けん液での洗身」「洗い流し」の湯量・時間をあらかじめ設定すれば、
ボタン長押しだけで毎回設定どおりの入浴が可能です。誰でも簡単にご使用できます。

(例)


入浴時間	石けん液洗身時間	洗い流し時間	合計設定時間
2分(湯量ふつう)	60秒(湯量少ない)	2分(湯量多い)	5分



「入浴装置用3off」でお手入れ要らず。

簡単操作で槽内に防カビ防臭除菌剤「入浴装置用3off」を散布します。シャワー入浴装置用に
成分を一から見直し、防カビ力を高めました。
ストレッチャーなどカビが気になるものを入れ
れば、同時に防カビ防臭除菌ができます。

※すべての菌・ウイルス・においの原因物質を除去するわけではありません

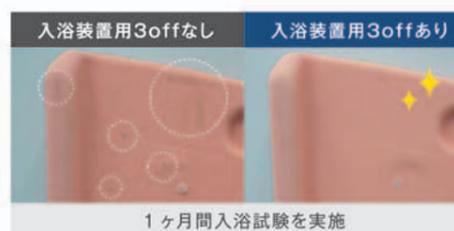

補充もカンタン