

Shower Booth etude fit


AMANO®

シャワーブース エチュード フィット [SBS2300F]

外形寸法	1700(L)×1000(W)×1025(H)mm	電源	単相100V 15A
内形寸法	1225(L)×710(W)×1020(D)mm	消費電力	220W(50Hz/60Hz)
質量	約115kg	電源入力	0.32kVA(50Hz)/0.31kVA(60Hz)
シャワーノズル	ノズル数:22基 平均粒径:280μm 流量 多い:約16L/min ふつう:約15L/min 少ない:約14L/min	材質	浴槽:FRP・PVC、フレーム:ステンレススチール、 ネックカーテン:ポリエステル(裏地ポリウレタン) 温度管理システム、デジタル温度表示(本体シャワー・ ハンドシャワー)ハンドシャワー1基、漏電ブレーカー内蔵、 浴槽洗浄機能、情報表示画面、言語選択機能(日本語/ 英語/中国語)、ウルトラファインバブル内蔵
本体シャワー	湯温設定可能温度:38℃~45℃ (異常温度:35℃以下48℃以上)	機能性能	石けん液注入機能、入浴時間表示、音声アナウンス、 浴槽洗浄機能、情報表示画面、言語選択機能(日本語/ 英語/中国語)、ウルトラファインバブル内蔵
ハンドシャワー	温度設定可能温度:30℃~42℃ (異常温度:30℃以下45℃以上)	消耗品	専用石けん液「薬用シャワーローション」、入浴装置用3off

標準設置例

- ① SBS2300F エチュード フィット (Lタイプ)
- ② SBS23R-SC シャワーチェア

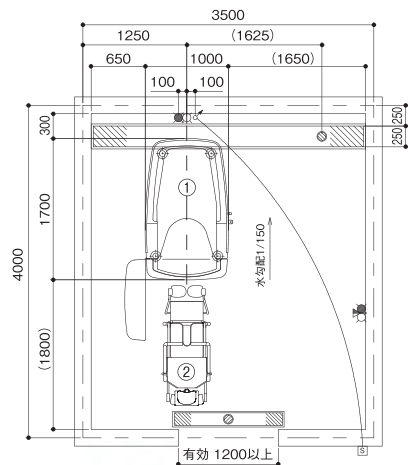

工事区分	設備工事内容・注意事項	設備工事	電気工事
設備工事	● 給湯 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) ○ 給水 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) (1)水道法の水質基準に適合する水質であること。 (2)給湯、給水圧は0.2~0.3MPa以内(2.0~3.0kg/cm ² 以内)とし、同圧になるようにすること。 (3)給湯、給水流量は、20~30L/minのこと。(4)給湯温度は、60℃(末端温度)にすること。 (5)給湯設備は、本機専用のガス給湯器50号相当(ボイラー能力7600kcal/h)以上を設置すること。 ※ガス給湯器が指定号数以下の場合、給水温によっては、給湯時間シャワー吐出量に支障が生じる場合があります。		
電気工事	○ 電気 単相100V 50/60Hz 15A(アース付) ※分電盤から本機への配線は単独として下さい。 電源入力: 0.32kVA(50Hz)/0.31kVA(60Hz) 電線: 単線1.6mm 又はより線2.0mm ² ×3芯(参考値) ※内線規定、及び、敷設状況により適切に選定して下さい。 電線管: PF管呼び16 壁出しFL+600mm以上とし、 PF管・電線共に壁面より3000mm出すこと。 分電盤: 漏電遮断器(定格電流15A、感度電流30mA)を設けること。 アース: D種接地工事 ⑤ 手元開閉器(ブレーカー): 単相100V 15A(浴室外に設置して下さい。) ※製品に異常があった際、すぐに電源を開放できる位置に手元開閉器(ブレーカー)を設置して下さい。	【1次側 給湯水配管側面図 壁出し】	【1次側 電気設備側面図 壁出し】
建築設備工事	● ビット排水 100A トラップ付 ※目皿が掃除できる位置に設置して下さい。 配管口径、排水能力が不足する場合は、複数個設けること。排水能力:30L/min以上のこと。	【排水ビット寸法図】	【排水ビット断面図】
その他の注意事項	(1)浴室内の換気には十分注意して下さい。 ※換気が不十分の場合は、製品内部に結露が発生し、故障につながる恐れがあります。 (2)本機周辺の水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとして下さい。 (3)ビット深さは水上で250mm以上として下さい。 (4)浴室までの搬入経路は、有効開口寸法1200mm以上、通路側有効1800mm以上となるようにして下さい。		

シャワーチェア [SBS23R-SC]

外形寸法	1135(L)×600(W)×1250(H)mm(背上げ時)(シート高500mm)
質量	約33kg
最大積載量	100kg
材質	座部:ポリエチレンフォーム フレーム:ステンレススチール スライド調節式枕:ポリエチレンフォーム ネックシール:ポリエチレンフォーム ネット:ポリエステル
リクライニング角度	背あて角度12~75° 座面角度6~20°
機能性能	スライド調節式枕・ネックシール・フットレスト回転収納方式・旋回はね上げ手すり・安全ベルト・ベルトパッド

定期点検のご案内 安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge

株式会社アmano

株式会社アmano

〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <https://www.amano-grp.co.jp/>

アmano 入浴

検索

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(355)2706
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 東関東支店 TEL.04(7157)4733
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 三島出張所 TEL.055(957)2464
- 名古屋支店 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(558)2615

安全に関するご注意

- ご使用前に、「取り扱い説明書」をよく読みのおえ正しくお使いください。 ●定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございすると感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RKT.2512.4000



Shower Booth エチュード フィット [SBS2300F] etude fit

ぬくもりが、長く続く。湯舟のようなシャワー体験を。





少しの時短が、
生まれる笑顔
をふやしてい
く。
介助の手を
軽くして、
人と人を
近づける
お風呂
です。

POINT
1

ネックカーテン

低身長・拘縮のある方でも安心。

POINT
2

透明上部カバー

足先まで見える視認性。

POINT
3


ウルトラファインバブル

清潔と温もりを同時に。

POINT
4

22か所のシャワーノズル

肩口からつま先までくまなく当たる。

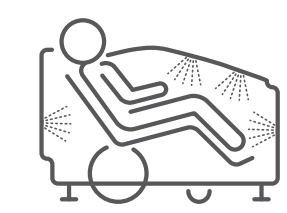

8つのこだわりPOINT

POINT
5

スムーズアプローチ

ドッキング不要でらくらく進入。

POINT
6

多機能シャワーチェア

洗身や移乗が簡単に行える機能搭載。

POINT
7

おまかせ入浴

ボタン一つでしっかり洗える。

POINT
8

自動洗浄

簡単操作で防カビ・防臭・除菌。

あたたかさへの、こだわり。





POINT
1

肩まであたたまるネックカーテン。

密閉性が高いネックカーテンを採用したことにより、ぬくもりを閉じ込めたまま、幅広い体型の方が入浴できます。洗濯が可能のため、清潔を保つことができます。

● 入浴者が約150cmの場合



● 入浴者が約170cmの場合



POINT
2

足先まで見える、透明上部カバー。

利用者が安全かどうか、いつでも確認したい。お風呂に入っている間、それは変わりません。シンプルな透明上部カバーで、全身しっかり見守れます。



POINT
3

ウルトラファインバブルで、清潔と温もりを同時に。


ウルトラファインバブル®を全ノズルに搭載。出浴後も高い保温性が続きます。

● 小さな泡の大きな力! 肌に優しい洗浄力!

通常の泡よりもずっと小さい1 μ m(0.001mm)未満の泡が毛穴の奥に入り込み、汚れや臭いの元をかき出し、お肌の健康を保つことができます。また、ウルトラファインバブルは表面温度保持の効果も見込めます。

<https://www.fujikeiki.jp/service/shower/>

※「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

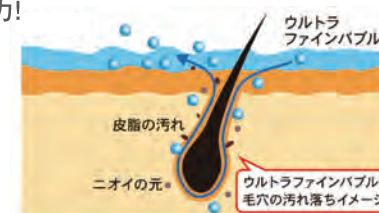

(イメージ)



●マークの場所にシャワーノズルが付いています。

★写真はLタイプです。

扉シャワーで、背中もしっかり温まります。




POINT
4

肩口から足元まで、22か所のシャワーノズル。

いちばん大事にしたいのは、浴槽とおなじ満足感。全身にくまなく当たるシャワーは、まるで湯舟に入ったよう。妥協しない設計で、節水とあたたかさを両立します。

想定使用湯量：14L/分

※湯量「少ない」の場合

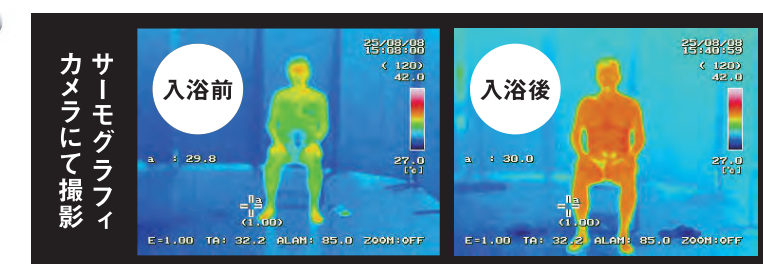

エチュードフィットに入浴する前、入浴した後の体温を測定 ※モデルは男性用水着を着用しております。

入浴者にも、
介護者にも、
やさしさを。



POINT 5 スムーズなアプローチ。

シャワーチェアを中に入れて、扉を閉めるだけ。
ドッキング部分のない簡単な構造でスムーズに進入できます。



POINT 6 移乗・洗身を楽しめるフルフラット。

フルフラットにできるので、洗身などの介助も容易です。また、背部と脚部が連動し、脚を持ち上げます。背部は背中中の動きに合わせてスライドすることで体の前ずれや皮ふへの摩擦を最小限まで抑えます。



POINT 7 おまかせ機能で簡単操作。

「入浴」「石けん液での洗身」「洗い流し」の湯量・時間をあらかじめ設定すれば、ボタン長押しだけで毎回設定どおりの入浴が可能です。誰でも簡単にご使用できます。



● 操作スイッチ


(例)

- 入浴時間
2分(湯量ふつう)
- 石けん液洗身時間
60秒(湯量少ない)
- 洗い流し時間
2分(湯量多い)
- 合計設定時間
5分

POINT 8 「入浴装置用3off」でお手入れ要らず。

簡単操作で槽内に防カビ防臭除菌剤「入浴装置用3off」を散布します。シャワー入浴装置用に成分を一から見直し、防カビ力を高めました。洗浄時、シャワーチェアや入浴用枕などカビが気になるものを浴槽内に入れば、同時に防カビ防臭除菌ができます。

※すべての菌・ウイルス・においの原因物質を除去するわけではありません

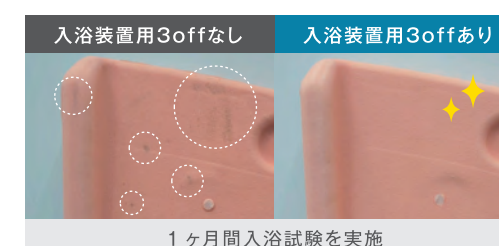

1ヶ月間入浴試験を実施



補充もカンタン

防カビ防臭除菌剤 入浴装置用3off

成分	防カビ剤
用途	防カビ・防臭・除菌
内容量	5L(サイズ:20×20×20cm)

※写真はCGイメージです。(実際の入浴装置用3offは無色透明です)