

02

軽さをもっと。

□約50%（当社比）軽くなったバッテリーで
ストレッチャー操作がラクに

03

安心をもっと。

□大型のサイドフェンスで大きな安心感をプラス
□高温異常をLEDランプの点滅で知らせます

Simple Bath *fino*

浴 槽

SP110 フィーノ



※ストレッチャーは別売りです。

SP100 フィーノ



※ストレッチャーは別売りです。

ストレッチャー

SP100-ST 電動ストレッチャー




SP110/SP100 フィーノ

外 形 寸 法	SP110：2,150 (L) × 840 (W) × 769 (H) mm (基準縁高: 680mm) SP100：2,150 (L) × 840 (W) × 769 (H) mm (基準縁高: 680mm)
浴 槽 内 寸	1,854 (L) × 720 (W) × 430 (D) mm
質 量	SP100：約75kg / SP110：約90kg
電 源	SP110のみ：DC6V 5.2Ah (電池仕様)
浴 槽 容 量	約450リットル
実 使 用 湯 量	約350リットル (160cmモデル)
給 湯 ・ 給 水	SP110のみ：20A 各1本 (一次側設備)
材 質	〈SP110 / SP100共通〉浴槽：FRP フレーム：スチール+防錆塗装
主 な 機 能 性 能	〈SP110のみ〉温度調節バルブ、ハンドシャワー 1 基、 おふろ高温異常表示、おふろ電池交換表示

SP100-ST 電動ストレッチャー


外 形 寸 法	1,900 (L) × 950 (W) × 1,280~1,780 (H) mm
担 架 面 高 さ	390~890mm
質 量	約95kg
最 大 積 載 量	100kg
電 源	DC24V 2.5Ah (バッテリー仕様)
昇 降 装 置	電動アクチュエーター (上昇 約22秒 / 下降 約17秒 (積載量70kg))
昇 降 回 数	バッテリー 1 回充電あたり約50回 (積載量70kg)
材 質	フレーム：ステンレススチール / マット：ポリエチレンフォーム
主 な 機 能 性 能	リクライニング (背部: 自動 27° / 手動 33°、5°以下)、後輪同時ロック、 キャスター径φ125mm、脱着スライド調節式枕、足受け、サイドフェンス、 入浴者用手すり、安全ベルト、ベルトパッド、リモコン、バッテリーパック、充電器、 ACアダプター、昇降メロディー、バッテリー残量表示、バッテリー残量音声アナウンス

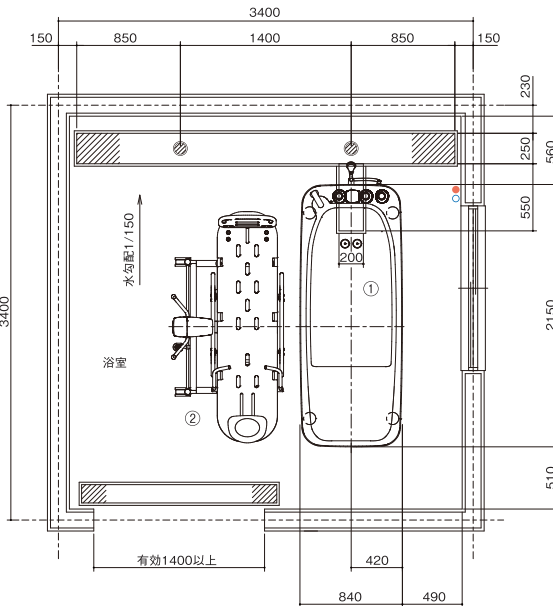

標 準 ①SP110 フィーノ
設 置 例 ②SP100-ST 電動ストレッチャー

工事区分	SP110設備工事内容
設備工事	●給湯 20A ボールバルブ止め (壁出しFL+600mm以上としてください。) ○給水 20A ボールバルブ止め (壁出しFL+600mm以上としてください。) (1)水道法の水質基準に適合する水質であること。 (2)給湯、給水圧は0.15~0.3MPa以内 (1.5~3.0kg/cm²以内) とし、 同圧になるようにしてください。 (減圧弁本体内容) (3)給湯温度は、50℃以上60℃以下の範囲で設定してください。
建設 設備工事	◎ビッド排水 100A以上 トラップ付 目面付 (本体外に設置ください。) 排水能力200L/min以上のこと 排水能力が不足する場合は、複数個設けること。

その他の注意事項
(1)浴室内の換気には十分注意してください。
(2)水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとしてください。
(3)ビッド深さは250mm以上とってください。
(4)浴室までの搬入経路は有効開口寸法1400mm以上、
通路側有効1700mm以上となるようにしてください。

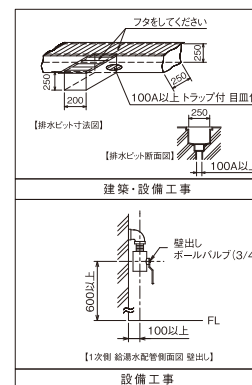

定期点検のご案内 安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge

株式会社アmano

株式会社アmano

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <http://www.amano-grp.co.jp/>

アmano 入浴

検索

●札幌営業所 TEL.011(768)8758
●盛岡営業所 TEL.019(601)1566
●仙台営業所 TEL.022(259)5611
●関東支店 TEL.048(423)6856
●新潟営業所 TEL.025(384)0987
●東京東営業所 TEL.04(7126)7702
●南関東支店 TEL.045(947)3930
●本社営業所 TEL.0538(37)6416
●名古屋営業所 TEL.052(505)6500
●松本営業所 TEL.0263(88)2797
●金沢営業所 TEL.076(269)4011
●大阪支店 TEL.06(6380)5177
●神戸営業所 TEL.078(939)4772
●広島営業所 TEL.082(555)8839
●高松営業所 TEL.087(813)3600
●福岡営業所 TEL.092(433)0931

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●定期的に機器の点検を行ってください。
●この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございすると感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Simple Bath *fino*

シンプルバス フィーノ [SP110/SP100]

追求したのは、
本当に必要な機能の
使いやすさです。



AMANO®

01

使いやすさを もっと。

- ☐ ストレッチャーと浴槽がスッと連結する機構
- ☐ 車輪のロックを2輪同時に簡単に
- ☐ 片手でもしっかり持てるバッテリー形状
- ☐ 枕と足受けの調節を簡単に



電動ストレッチャー

電動ストレッチャー [SP100-ST]



浴槽とのドッキングがスムーズ

浴槽側のガイドレールに合わせてスムーズにドッキングします。



2輪同時にロック

のせかえ作業の労力軽減
車いすの座面とストレッチャーの担架面の高さを同じにすることができます。



※担架面最下端は床から45cm

腰痛防止



「あっ、ラク!」そんな声を聞きたくて、細部までこだわりました。

feature

軽く扱いやすいバッテリーパック

上昇に約22秒、下降に約17秒。昇降時の音も静かです。バッテリーは1回充電あたり約50回昇降可能です。

■ 軽いから操作がラクラク
当社従来比で50%軽量化しました。ストレッチャー操作時の負担が軽減されます。

■ 握りやすさがアップ
形状を見直しました。片手でもしっかり持つことができます。取り外しや充電がスムーズに行えます。



取り外し時 充電時

担架を昇降できるリモコン

ストレッチャーの担架昇降はリモコンで手元操作できます。



入浴者の体格に合わせて調節できる担架

手動・自動の2段階+フラットのリクライニングが可能です。枕位置も簡単に調節できます。



自動でリクライニング

担架がフラットな状態で入浴しても、自動でリクライニングして上体が起きます。



動画で動作をCHECK!

安心のサイドフェンス

昇降中や入浴中に安心感のある大型フェンスです。

操作しやすい大型ハンドル

持ちやすい大型ハンドル。操作をしやすくスムーズに動かせます。



浴 槽

フィーノ [SP110/SP100]

ストレッチャーを昇降させて、 入浴/出浴をします。

ストレッチャーのリモコンの下降ボタンを押している間、ゆっくりと担架が下降します。ボタンから指を離せばすぐに停止する安全設計です。

初めての操作でも 簡単に安心なミキシング。

湯はり量、シャワー湯量、温度の調節がダイヤル式で操作が簡単です。浴槽の温度が高温になるとランプが点滅してお知らせします。



浴槽への湯はりの湯量を調節

操作パネル

シャワーの湯量を調節

高温になると、LEDランプが点滅

給湯とシャワーの温度を調節

TYPE 01 SP110

シャワーと湯温調節機能を備えたモデル



TYPE 02 SP100

グループホームや高齢者住宅などの小規模施設に最適!



SP110/SP100 | 電気工事不要!

置くだけで重度化に対応!

浴室内の電気設備が必要ありません。給湯・給水、排水設備があれば導入が可能です。大がかりな改修工事することなく寝台浴槽の導入が可能です。